



Regevan[®] Pn

리제반 PN 시술 가이드

시술 전 환자 준비사항

- 시술 전 세안을 합니다.
- 마취 크림을 약 30분 이상 도포하고 시술 전에 마취 크림을 제거합니다.
- 시술 전 보릭 혹은 알코올과 같은 소독 솜으로 시술 부위를 소독합니다.



기본 가이드 라인

Injection 깊이	Superficial dermis, intradermal (진피내)
Injection 양 (1point 당)	0.02 ~ 0.05ml
Injection 거리	0.5~2cm (one form the other)



시술 시 참고사항

- 리제반 PN 약물이 진피에 주입 될 수 있도록 주사바늘을 대각선으로 눕혀 시술합니다.
- INTERVAL은 약 0.5~2cm 간격으로 주입하며, 고객의 피부 상태에 따라 조절 가능합니다.
- 건조한 부위, 모공 넓은 부위, 잔주름이 많은 부위, 탄력이 떨어지는 부위 등의 피부 상태에 따라 용량, 횟수, INTERVAL을 조절하여 시술합니다.
- 평균 2주에 간격으로 4회 시술하며, 4회 시술 이후에는 유지요법으로 3~6개월 간격으로 1회 씩 추가 시술 권장합니다.
- 1회 시술 시 양 볼은 기본 2cc, 얼굴 전체는 기본 4cc 권장합니다. 다만, 고객님의 피부 상태에 따라 용량은 추가 가능합니다.
- 시술 후 리제반 C 연고를 도포해줍니다.



양볼 부위 시술 시 (기본 2cc 권장)

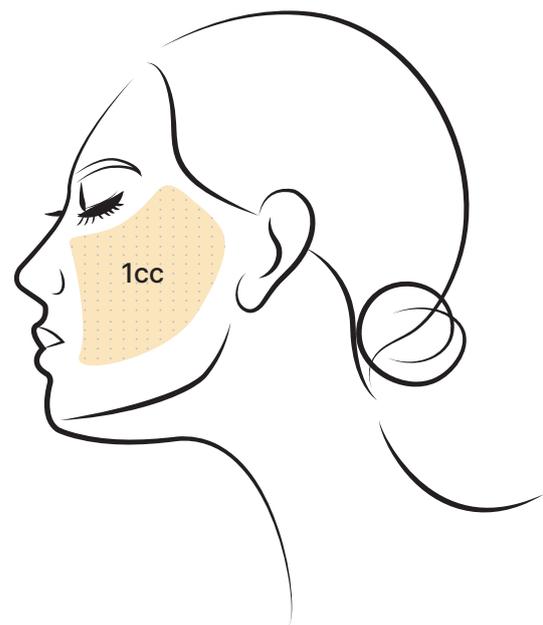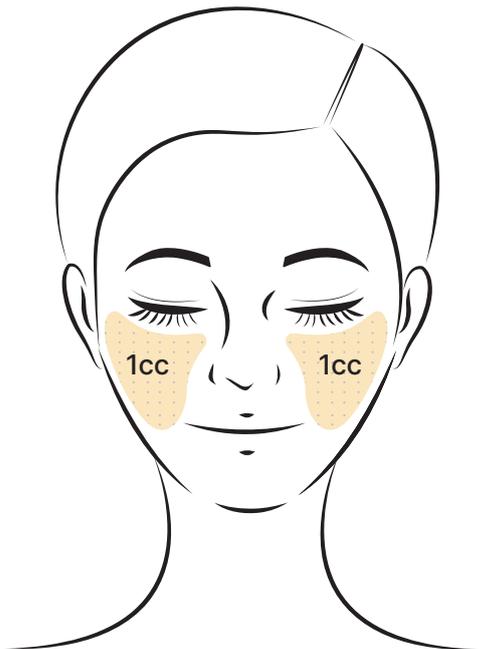

얼굴 전체 시술 시 (기본 4cc 권장)

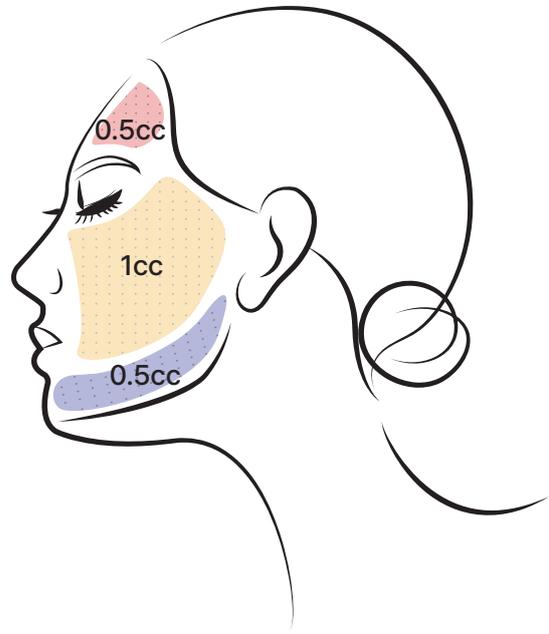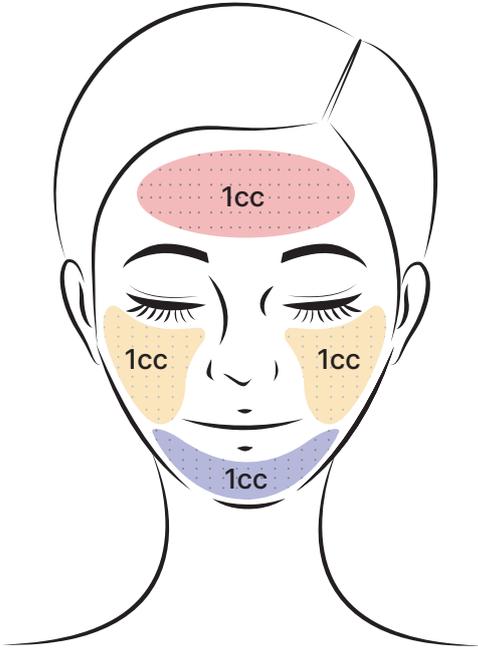

목 전체 시술 시 (기본 2cc 권장)

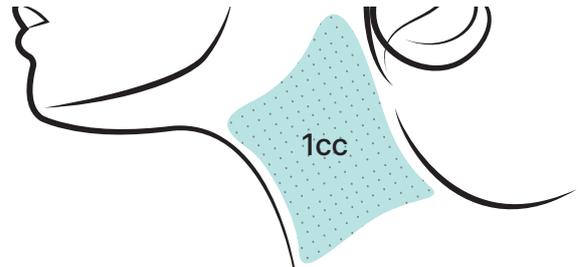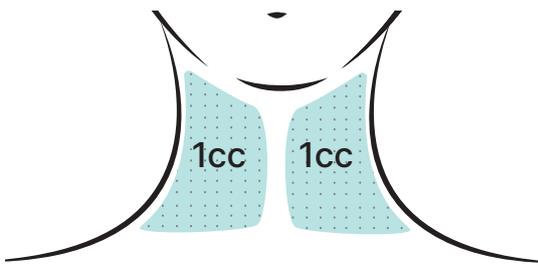

시술 후 주의 사항

- 시술 직후 개인에 따라 붓고 약간의 통증, 붓기, 주사자국이나 멍이 생길 수 있으며, 1주일 이내에 소실됩니다.
- 시술 직후 주사 부위가 울룩불룩하게 올라오는 엠보싱 현상이 발생할 수 있으며, 약 1~2일 후에 호전됩니다.
- 시술 후 시술 스크럽제, 각질제거제 등의 사용을 피하고 시술 부위를 문지르거나 자극을 주는 행동은 삼가 해야 합니다.
- 시술 당일은 세안을 피하며, 리제반 C 연고를 도포해줍니다.
- 시술 후 과한 열감을 주는 사우나, 찜질방, 격한 운동 등은 1주일 정도 피하는 것이 좋습니다.
- 시술 후 음주 및 흡연은 1주일 정도 피하는 것이 좋습니다.
- 시술 후에는 자외선 차단제를 꼼꼼히 발라줍니다.